

Návod na použití

Popis produktu

- Oxygen-1 je kompaktní domácí zařízení pro inhalaci vzduchu s vyšším podílem kyslíku a běžné wellness použití. Vhodné pro krátkodobé použití při odpočinku a subjektivním osvěžení v domácím prostředí. Není určeno k léčbě ani k řešení zdravotních potíží.

Napájení

- Zařízení se napájí přiloženým adaptérem do el. sítě.

Ovládání

- Generátor zapnete DLOUHÝM stiskem zapínacího tlačítka. Poté krátkým stiskem přepínáte mezi pracovními režimy O2 a NEB a třetím stisknutím zařízení vypnete.
- Zařízení může pracovat ve 2 pracovních módech: O2, NEB – mezi těmito módy lze přepínat tlačítkem na přední straně zařízení. To, který mód je aktivovaný, je zvýrazněno v přehledném informačním panelu na přední straně zařízení.
- O2 – režim generování kyslíkem obohaceného vzduchu
- NEB – Inhalační režim


Použití

- Před prvním použitím doporučujeme nechat zařízení běžet 10 minut tzv. „na prázdko“.
- Režim „koncentrátoru“ (O2) – nasadte hadičku pro vdechování kyslíku (modrá barva koncovky pro vdechování) na výdech nacházející se pod zapínacím tlačítkem. Nasadte dýchací kanelu a spusťte zařízení stisknutím zapínacího tlačítka do režimu O2.

- Inhalační režim (NEB) - na výdech nasadte hadičku s oranžovými koncovkami a tu zasuňte do spodní části nebulizační nádoby (viz instruktážní video), nainstalujte dýchací masku – nyní můžete inhalovat roztok v inhalační nádobě (např. Vincentku)
- Zařízení se automaticky zastaví po 40 minutách nepřetržitého používání.** Pro další použití je nutné znovu třikrát stisknout tlačítko zapínací tlačítko.

Údržba

- Zařízení můžete čistit navlhčeným hadříkem.
- Dýchací hadičky je vhodné řádně sterilizovat před každým použitím, obzvláště používá-li zařízení více osob.
- K čištění hlavní jednotky **nepoužívejte čisticí prostředky, těkavé oleje, vodu ani alkohol** (mohou způsobit praskliny nebo změnu barvy).
- Čistěte pouze měkkým hadříkem.
- Vzduchový filtr se nachází na spodní straně zařízení pod plastovou krytkou. Je vhodné jej jednou měsíčně nebo po každých 10 hodinách provozu vyndat a vyčistit pod tekoucí vodou – až filtr vyschne, můžete jej vrátit zpět do zařízení.
- K sušení filtru nepoužívejte fén** (horký vzduch může způsobit deformaci nebo selhání). Filtr musí po umytí vodou samovolně vyschnout.

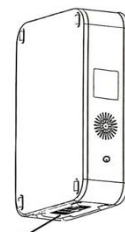

Vzduchový filtr

Upozornění

Produkt není zdravotnický prostředek. Není určen k diagnostice, prevenci, sledování, léčbě ani zmírnění onemocnění nebo zdravotních obtíží. Nenahrazuje lékařský kyslík ani odbornou zdravotní péči. Nepoužívejte při dušnosti, dechové nedostatečnosti ani jiných závažných zdravotních stavech. V případě neobvyklých zvuků nebo abnormální funkce zařízení ihned přestaňte používat.

- Rozsvítí-li se dioda „EX“, je vhodné vyměnit molekulární síta, které mají živostnost 1000 hodin. Náhradní molekulární síta můžete zakoupit na webu www.uvtech.cz. Výměnu můžeme provést u nás, kontaktujte naši zákaznickou podporu na emailu info@uvtech.cz pro více informací.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nechte jej **jednou týdně běžet na 30 minut**, což pomáhá udržet kvalitu zeolitu v molekulárním sítu.



Videonávod k zařízení

Lze také vyhledat na Youtube „Oxygen-1 ukázka použití“

Varování

- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Vychází-li ze zařízení podezřelé zvuky, či se chová abnormálně, nepoužívejte jej a reklamujte jej.
- Zařízení nikdy neopravujte svépomocí a nerozebírejte ho. Zařízení neskladujte v mrazu či horku.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a zamezte styku zařízení s vodou.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Průtok vzduchu s vyšším podílem kyslíku: 1 l/min

Koncentrace kyslíku na výstupu: přibližně 35–55% (20 °C / normální tlak, 60% relativní vlhkost)

Technologie: VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption)

Funkce: generátor kyslíkem obohaceného vzduchu, inhalační režim

Rozměry zařízení: 295 mm (šířka) × 210 mm (výška) × 78 mm (hloubka)

Hmotnost: 1,88 kg

Hlučnost: cca 45 dB (ve vzdálenosti 1 m)

Příkon: 25 W

Napájení: 12 V / 2 A

Možnosti napájení: síťový adaptér, adaptér do autozapalovače 12 V

Kapacita inhalační nádoby: 8 ml

Obsah balení: hlavní zařízení Oxygen-X1, adaptér do elektrické sítě (EU), adaptér do autozapalovače (12 V), dýchačí hadička, příslušenství pro inhalační režim

Kontakt v případě dotazů či technické podpory: info@uvtech.cz



POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝMI OBALY

Použitý obalový materiál odevzdejte na místě určeném obcí k likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem. Tyto výrobky odevzdejte na určených sběrných místech k řádné likvidaci, přepracování a recyklaci. V některých zemích Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete výrobky také vrátit místnímu prodejci, pokud si zakoupíte ekvivalentní nový výrobek. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může mít nesprávná likvidace odpadu.

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky platných směrnic EU.

